

BRO APP

Quickstart Guide

Damit Du Deinen BRO auch mit der neuen App problemlos bedienen kannst, haben wir für Dich eine kurze Übersicht mit den wichtigsten Neuerungen erstellt.

Sollte doch noch etwas unklar sein, kannst Du Dich gerne bei uns melden.

Verbindungsstatus

Über dieses Symbol verbindest Du Deinen BRO mit der App oder trennst die Verbindung.

Hupe

In brenzlichen Situationen kannst Du Dich mit der Hupe bemerkbar machen.

Geschwindigkeit & Akku

Dieser Balken visualisiert die Geschwindigkeit oder den Akkustand (wechseln durch Tippen auf die Zahl).

Parkmodus

Hauptmodus

Fahrmodus

Hauptmodus

Höhenverstellmodus

Untermodus vom Parkmodus

Schnelleinstellungen

Passe die Geschwindigkeit, die Helligkeit der Lichter sowie die Lautstärke der BRO-Sounds an.

Statusanzeige

Hier siehst Du, ob mit Deinem BRO alles in Ordnung ist. Sie funktioniert nach dem Ampelsystem (Grün, Orange und Rot).

Haupteinstellungen

Hier kannst Du die Einstellungen Deines BROs verwalten.

Rückfahrkamera

Die Kamera verschafft Dir beim Rückwärtsfahren einen Überblick.

Geschwindigkeit & Akku

Durch Tippen auf die Zahl kannst Du zwischen der Km/h-Anzeige und Akkustand wechseln.

Treppenmodus

Hauptmodus

Raupenmodus

Untermodus vom Treppenmodus

Sitzeinstellungen

Passe die Rückenlehne, die Sitzhöhe sowie die Fußstütze Deinen Bedürfnissen an.

Kontrollzentrum

Hier findest Du auf einen Blick alle wichtigen Funktionen von BRO.

