

# Fernsteuerung Deines BROs

Drücke diesen Knopf um die Xbox Fernbedienung einzuschalten. Sobald der Knopf dauerhaft leuchtet ist die Verbindung zu Deinem BRO hergestellt.

Halte diesen Knopf solange gedrückt bis das Licht wieder erlischt, um die Fernbedienung auszuschalten.



Drücke die beiden hinteren unteren Tasten gleichzeitig um die Fernsteuerung zu aktivieren. Dein BRO reagiert darauf mit einem akustischen Signal, orange blinkender Steuerkonsole und in der App erscheint das Fernbedienungs-Symbol. Dein BRO kann nun mit der Fernbedienung gesteuert werden, die normale Steuerung direkt am BRO ist deaktiviert.



Bewege den kleinen "Joystick" auf der Fernbedienung so, wie Du es sonst mit dem Joystick an Deinem BRO machst um zu fahren. So kannst Du deinen BRO fernsteuern.

Klickst Du einmal von oben auf den Knopf wechselt die Fahrgeschwindigkeit zwischen langsam & schnell.



Mit der Fernbedienung kannst Du jeden Motor an Deinem BRO einzeln ansteuern. Halte dafür die gewünschte Taste (1.Räder, 2.Support, 3.Rückenlehne, 4.Fußstütze, 5.Sitzhöhe) gedrückt und bewege gleichzeitig den kleinen Joystick hoch oder runter.

Möchtest Du deinen BRO für die Autoverladung auf die Raupen stellen, drücke zunächst 1.Räder und bewege den Joystick nach oben bis die großen Räder ca. 30cm über dem Boden sind. Drücke dann 2.Support und bewege den Joystick nach unten um Deinen BRO auf die Raupen abzusenken



Um die Steuerung wieder an Deinen BRO zurückzugeben halte die rechte hintere untere Taste gedrückt und drücke einen der Buchstaben. Bewege im Anschluss den kleinen Joystick auf der Fernbedienung solange, bis Dein BRO einen sicheren Modus erreicht hat (Raupe- oder Parkmodus). Du erkennst dies wie gewohnt am Symbol auf der Steuerung Deines BROs. Er ist nun für Deine Weiterfahrt bereit.

Du kannst die Fernsteuerung auch über die App deaktivieren.

**Achtung! Die Fernsteuerung darf nur benutzt werden, wenn niemand auf Deinem BRO sitzt!**