


Geht meine Treppe?

Ermittle, ob BRO Deine Treppe steigen kann.

BRO kann mit seinen einzigartigen Raupen verschiedenste Treppen bis zu 36° hoch und runter steigen.¹ Mit diesem Leitfaden kannst Du ganz einfach überprüfen, ob BRO für Deine Treppen geeignet ist. Führe dazu die folgenden drei Schritte durch.

Bist Du Dir auch nach dem Ausmessen unsicher, ob BRO Deine Treppe befahren kann? Wir helfen Dir gerne weiter, kontaktiere uns einfach unter sales@scewo.ch.

- 1** Messe die Tiefe (T) des Treppentrittes und notiere Dir die Zahl.²
- 2** Messe die Höhe (H) des Treppentrittes und notiere Dir die Zahl.³
- 3** Suche die von Dir ermittelten Treppentritt-Masse in der Tabelle und Du siehst, ob BRO diese Treppe befahren kann.

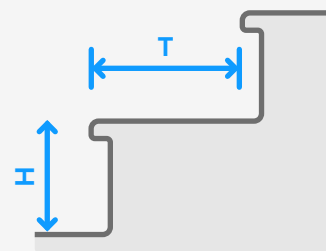

		Tiefe (T)															
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Höhe (H)	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	16	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	17	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	18	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	19	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	20	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	21	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

¹ Wendeltreppen sind mit BRO nicht befahrbar.
² Podesttiefe nach Treppenlauf muss min. 120 cm betragen.
³ Einzeltritte sind bis maximal 20 cm Höhe befahrbar.