


# BRO als Gepäck.

Ermittle, ob Du BRO als Gepäck in Deinem Auto verstauen kannst.

BRO wurde so konzipiert, dass er problemlos in verschiedensten Fahrzeugen transportiert werden kann. Die Rückenlehne lässt sich herunterklappen oder alternativ sogar demontieren. Dadurch findet er in noch kleineren Stauräumen Platz. Mit diesem Leitfaden kannst Du ganz einfach überprüfen, ob BRO als Gepäck in Dein Auto passt. Führe dazu die folgenden drei Schritte durch.

Bist Du Dir auch nach dem Ausmessen unsicher, ob BRO in Dein Auto passt? Wir helfen Dir gerne weiter, kontaktiere uns einfach unter [sales@scewo.ch](mailto:sales@scewo.ch).

- 1 Messe die Tiefe (T) des Kofferraums in Deinem Auto.
- 2 Messe die Höhe (H) des Kofferraums in Deinem Auto.<sup>1</sup>
- 3 Suche die von Dir ermittelten Kofferraum-Masse in der Tabelle und Du siehst, ob BRO darin Platz findet.

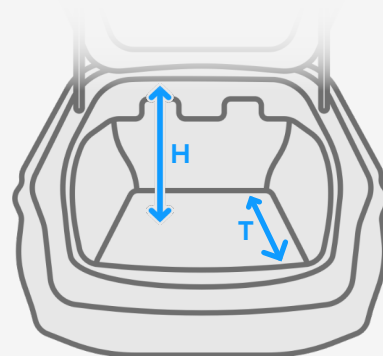

<sup>1</sup> Vergewissere Dich, dass Du die kleinste Höhe (Ladeluke) misst.

		Tiefe (T)			
		Bis 107.5 cm	107.5 – 113 cm	113 – 119.5 cm	Ab 119.5 cm
Höhe (H)	Bis 67 cm	✗	✗	✗	✗
	67 – 72.5 cm	✗	✓	✓	✓
	72.5 – 73.5 cm	✗	✓	✓	✓
	73.5 – 79 cm	✗	✓	✓	✓
	Ab 79 cm	✗	✓	✓	✓

- ✗ Leider passt BRO nicht in Dein Auto.
- ✓ BRO passt mit demontierter Rückenlehne in Dein Auto.
- ✓ BRO passt mit heruntergeklappter Rückenlehne in Dein Auto.