

Mit BRO über Schwellen.

Tipps und Tricks zum sicheren Umgang mit Schwellen.

BRO bietet faszinierende Funktionen mit denen er verschiedenste Hindernisse überwinden kann. Doch bei Schwellen ist Vorsicht geboten. Bitte beachte die folgenden Tipps und Tricks wenn Du mit BRO Schwellen befährst.

Hast Du Fragen zu BRO und wie Du mit ihm Schwellen befährst? Wir helfen Dir gerne weiter. Kontaktiere uns einfach unter sales@scewo.ch, oder melde Dich bei einem unserer Partner.

FAHRMODUS



Schwellen **bis 5 cm**



Schwellen **ab 5 cm**



Freistehende Schwellen
bis 5 cm¹



Freistehende Schwellen
ab 5 cm

¹ Bei freistehenden Schwellen benötigt BRO für die Anfahrt und das Ausschwingen genügend Platz.

TREPPENMODUS & RAUPENMODUS



Schwellen **bis 20 cm**



Schwellen **ab 20 cm**



Freistehende Schwellen



BRO kann die Schwelle befahren.



BRO kann die Schwelle leider nicht befahren.