


# Oberschenkelstütze.

Wie Du die Oberschenkelstütze richtig verwendest.

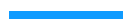

BRO kann ganz einfach mit zwei Oberschenkelstützen ergänzt werden.<sup>1</sup>  
Dieser Leitfaden zeigt Dir, wie Du die Oberschenkelstütze richtig verwendest.


Ist Dir etwas unklar, oder hast Du Fragen? Wir helfen Dir gerne weiter.  
Die Kontaktdaten von uns und unseren Partnern findest Du auf der Webseite.

## Warnhinweis für Personen mit einem Herzschrittmacher:







Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halte als Träger\*in solcher Geräte den vom Hersteller empfohlenen Abstand zu den Magneten an den Oberschenkelstützen.

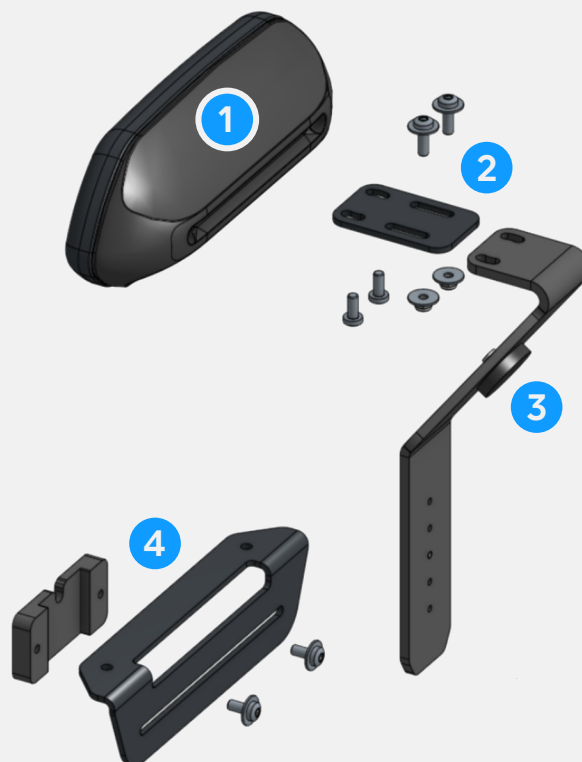

- 1 Kissen
- 2 Verlängerungsadapter
- 3 Winkelblech
- 4 Führungsschiene

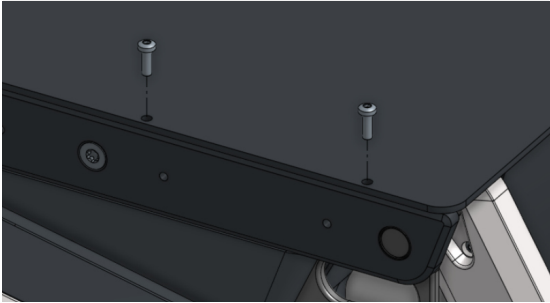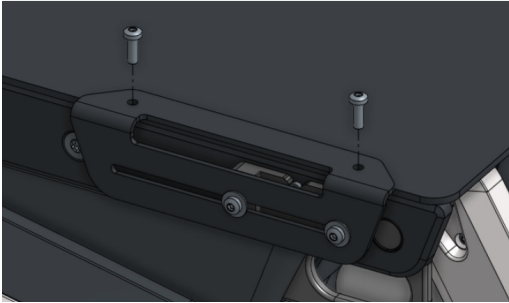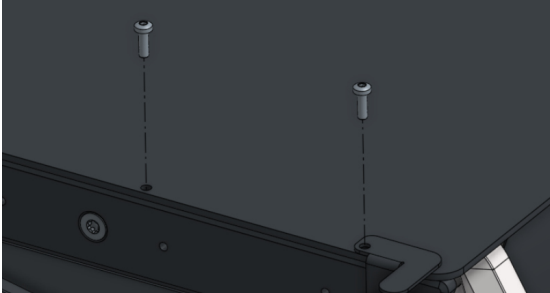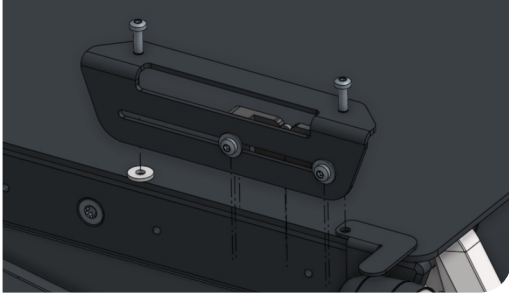

<sup>1</sup> Die Oberschenkelstützen, sowie weiteres Zubehör für BRO kann bei Scewo oder einem zertifizierten Partner erworben werden.

| Montage                       | Schritt 1  | Schritt 2   |
|-------------------------------|--|---|
| <b>BRO ohne Zusatzlichter</b> | Die beiden vordersten Schrauben der Sitzplatte lösen.   | Die Führungsschiene auf die Sitzplatte legen und mit den gelösten Schrauben festziehen.                                       |
| <b>BRO mit Zusatzlichter</b>  | Die beiden vordersten Schrauben der Sitzplatte lösen.  | Die Unterlagsscheibe auf dem hinteren Loch platzieren und darauf die Führungsschiene mit den gelösten Schrauben festziehen.  |
| Anwendung                     | Beschreibung   | Abbildung   |
| <b>Fahren</b>                 | Die seitlichen Beinstützen werden in die Führungsschienen eingesetzt und sind dadurch fixiert.   |   |
| <b>Transfer</b>               | Für den Transfer kann die Oberschenkelstütze dank des Magneten an der Oberschenkelstütze auf der anderen Seite befestigt werden.         |   |

| Anpassungen           | Beschreibung   | Abbildung   |
|-----------------------|--|---|
| <p>Höhe</p>           | <p>Die Höhe der Oberschenkelstütze kann mittels der Befestigungsschraube in einem der fünf verschiedenen Löcher angepasst werden.</p>                                |  <p>T20</p>   |
| <p>Tiefe</p>          | <p>Die Position der Schraube kann im Langloch des Verlängerungsadapters verstellt werden. Der Verlängerungsadapter kann auch weggelassen werden.</p>                 |  <p>T25</p>  |
| <p>Kissenposition</p> | <p>Die Position des Polsterkissens kann wahlweise über die sich im Kissen befindenden Schraubenlöcher oder dem Langloch an der Führungsschiene angepasst werden.</p> |  <p>T25</p> |