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


BRO als Mitfahrersitz.

So kannst Du BRO als Mitfahrersitz im Auto verwenden.¹



BRO verfügt über einen speziellen «Mitfahrmodus»². Dieser Modus verwandelt BRO in einen Mitfahrersitz, in welchem Du als Fahrgast im Auto sitzen bleiben kannst. Dieser Leitfaden gibt Dir lediglich einen Überblick über die Nutzung des Mitfahrmodus in einem Auto mit Heckausschnitt. Für eine detailliertere Anleitung und andere Autos lies bitte unbedingt die Bedienungsanleitung. Die aktuellste Version kannst Du auf unserer Website herunterladen.

[Bist Du Dir trotzdem noch unsicher, wie Du BRO als Mitfahrersitz nutzen kannst? Wir helfen Dir gerne weiter. Die Kontaktdaten von uns und unseren Partnern findest Du auf unserer Webseite.](#)

1

Fahre mit Deinem BRO vorwärts vor die Laderampe, sodass Du in Fahrtrichtung in den Kofferraum reinfahren kannst und wechsele in den Parkmodus. Hänge nun die Haken der Sicherheitsgurte³ in die vorderen beiden Befestigungspunkte Deines BROs ein oder bitte eine Hilfsperson dies zu machen.




2

Wähle nun auf dem Touchpad den Autohaken aus, um den Mitfahrmodus zu aktivieren.



3

Wechsele nun in den Mitfahr-Einsteigemodus indem Du das Raupenmodus-Symbol auswählst und fahre vorwärts über die Laderampe in den Kofferraum.⁴

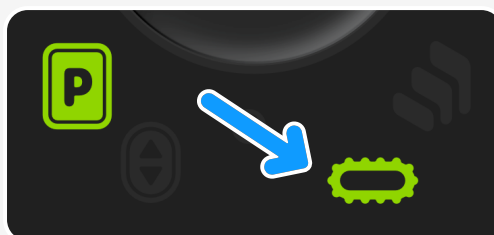

¹ Verwende BRO nur in Fahrzeugen, die für den Transport eines Rollstuhls zugelassen sind.

² Nur Rollstühle ab der Series One (V1.1) sind mit den Befestigungspunkten ausgestattet.


³ Verwende zur Sicherung Gurte, die für ein Gewicht von mindestens 160 kg (nach ISO 10542-1) zugelassen sind. Wir empfehlen die Sicherung mit 6 Sicherheitsgurten (2 vorne und 4 hinten).

⁴ Bitte bei sehr steilen Rampen eine Drittperson darauf zu achten, dass BRO nicht kippen kann.

4

Bist Du im Auto an die Position gefahren, in welcher Du mitfahren möchtest, wählst Du das Parkmodus-Symbol an, um in die Mitfahr-Position zu wechseln. Bewegst Du den Joystick, fährt Dein BRO nun automatisch in die empfohlene Mitfahrposition (Ring leuchtet grün).

Sollte es aufgrund der Gegebenheiten des Fahrzeugs nicht möglich sein, die empfohlene Mitfahrposition einzunehmen, kannst Du den Übergang frühzeitig beenden. Wähle dazu den Autohaken auf dem Touchpad aus. Du kannst nun Deine Sitzposition wie gewohnt anpassen (Ring leuchtet gelb). Wir empfehlen Dir wann immer möglich in der vorprogrammierten Position zu bleiben.

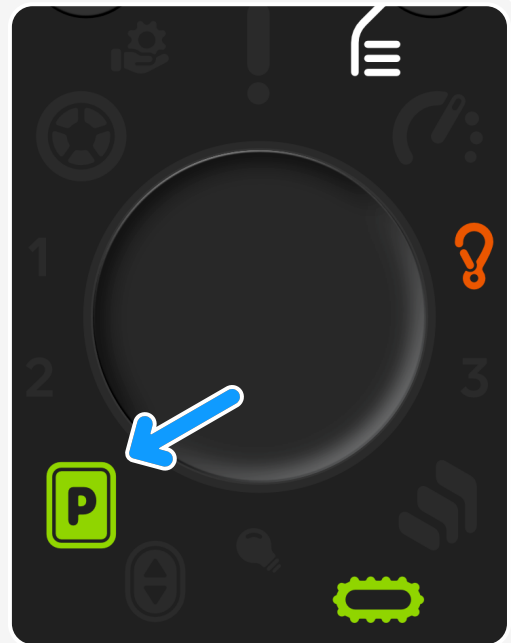

5


Schnalle Dich nun mit einem Drei-Punkte-Gurt* an und bitte eine Hilfsperson Deinen BRO an den hinteren beiden Befestigungspunkten zu sichern.



6

Bist Du am Ziel angekommen, löse die Sicherungsgurte hinten oder bitte eine Hilfsperson, dies zu tun und wechsele zum Rausfahren wieder in den Mitfahr-Einsteigemodus, indem Du das Raupenmodus-Symbol anwählst.


Lasse die vorderen Sicherungsgurte zum Rausfahren unbedingt eingehängt und bitte eine Drittperson darauf zu achten, dass BRO nicht kippen kann!

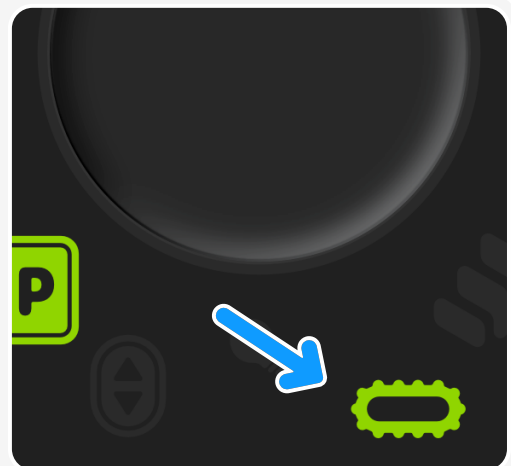

7

Sobald Du die Laderampe ganz verlassen hast, wählst Du auf dem Touchpad das Autohaken-Symbol aus, um den Mitfahrmodus zu beenden. Entferne nun die vorderen Sicherungsgurte.

Nun kannst Du über den Parkmodus in den Fahrmodus wechseln und Dein Abenteuer fortsetzen.

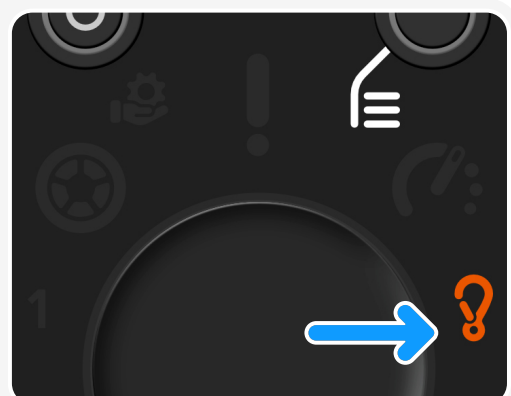

*Verwende hier nie den Beckengurt von BRO, sondern immer die integrierten Gurte des Autos. Häufig ist ein zusätzlicher zertifizierter Beckengurt als Verlängerung erforderlich.