

BRO comme siège passager.

Voici comment tu peux utiliser BRO comme siège passager dans les voitures.¹



BRO dispose d'un « mode passager »². Ce mode transforme BRO en un siège passager, dans lequel tu peux rester assis dans la voiture en tant que passager. Ce guide te donne seulement un aperçu de l'utilisation du mode passager dans une voiture avec une découpe basse au niveau du coffre. Pour des instructions plus détaillées et d'autres types de voitures, consulte attentivement le mode d'emploi. Tu peux télécharger la version la plus récente sur notre site web.

Tu n'es toujours pas sûr de savoir comment utiliser BRO comme siège passager ? Nous sommes là pour t'aider. Tu trouveras nos coordonnées et celles de nos partenaires sur notre site web.

1

Avance ton BRO devant la rampe de chargement de manière à pouvoir entrer dans le coffre dans le sens de la marche et passe en mode parking. Accroche maintenant les crochets des sangles de sécurité³ aux deux points d'attache frontales de ton BRO ou demande à une personne de t'aider à le faire.



2

Sélectionne maintenant le crochet de voiture sur le pavé tactile pour activer le mode de transport.



3

Passe maintenant en mode d'embarquement pour transport en voiture, en sélectionnant le symbole du mode chenille et avance dans le coffre en passant par la rampe de chargement.⁴



¹ N'utilise BRO que dans les véhicules autorisés à transporter des fauteuils roulants.

² Seuls les fauteuils roulant à partir de la Series One (V1.1) sont équipés de points de fixation.


³ Pour la fixation, utilise des sangles homologuées pour un poids d'au moins 160 kg (selon ISO 10542-1). Nous recommandons d'utiliser 6 sangles de sécurité (2 à l'avant et 4 à l'arrière).

⁴ Pour les rampes très pentues, demande à une tierce personne de veiller à ce que BRO ne puisse pas basculer.

4

Une fois que tu as atteint la position de passager souhaitée dans la voiture, sélectionne le symbole du mode parking pour passer à la position de passager. Si tu bouges le joystick, ton BRO se place automatiquement dans la position passager recommandée (l'anneau s'allume en vert).

S'il n'est pas possible de prendre la position de passager recommandée en raison des conditions du véhicule, tu peux mettre fin à la transition plus tôt. Pour ce faire, sélectionne le crochet de voiture sur le pavé tactile. Tu peux maintenant adapter ta position assise comme d'habitude (l'anneau s'allume en jaune). Nous te recommandons de rester dans la position préprogrammée chaque fois que cela est possible.

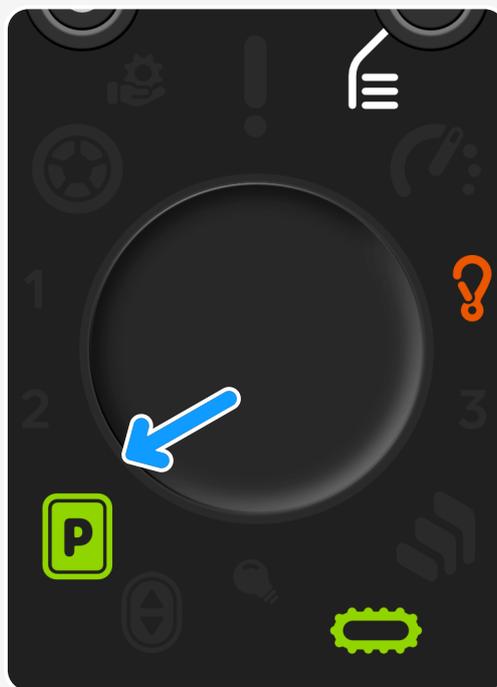

5


Attache-toi maintenant avec une ceinture à trois points¹ et demande à une personne de t'aider à fixer ton BRO aux deux points d'attache arrière.



6

Une fois arrivé à destination, détache les sangles de sécurité à l'arrière ou demande à une personne de le faire et, pour sortir, passe à nouveau en mode d'embarquement pour transport en voiture en sélectionnant l'icône du mode chenille.


Laisse absolument les sangles de sécurité avant accrochées pour sortir et demande à une tierce personne de veiller à ce que BRO ne puisse pas basculer !

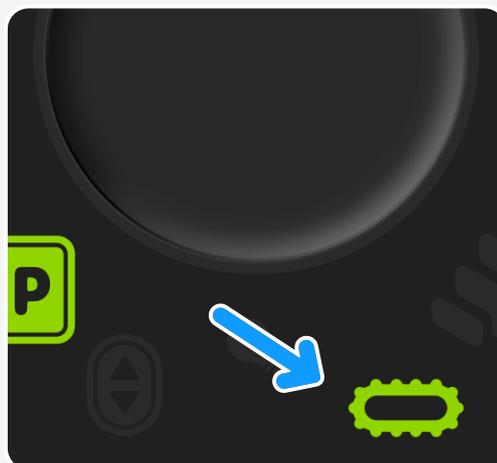

7

Une fois que tu as complètement quitté la rampe de chargement, sélectionne l'icône de crochet de voiture sur le pavé tactile pour quitter le mode de transport. Retire maintenant les sangles de sécurité frontales.

Tu peux passer en mode conduite en passant par le mode parking et poursuivre ton aventure.

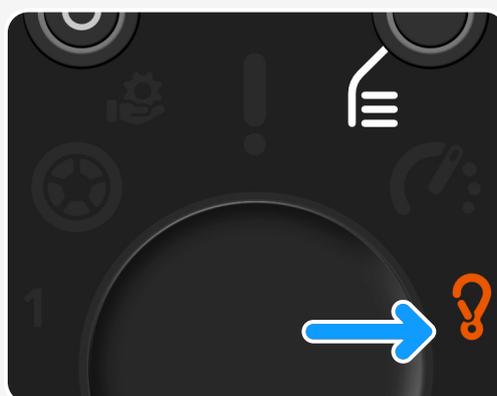

¹N'utilise jamais la ceinture ventrale de BRO dans ce cas, mais toujours les ceintures intégrées de la voiture. Souvent, une ceinture ventrale supplémentaire certifiée est nécessaire en tant que rallonge.