


Mes escaliers conviennent-ils ?

Détermine si BRO peut monter tes escaliers.

Grâce à ses chenilles uniques, BRO peut monter et descendre différents types d'escaliers jusqu'à 36°.¹ Grâce à ce guide, tu peux facilement vérifier si BRO convient à tes escaliers. Pour ce faire, suis les trois étapes suivantes.

Après avoir pris les dimensions, tu n'es toujours pas sûr que BRO puisse monter tes escaliers ? Nous t'aiderons volontiers, contacte-nous simplement à l'adresse sales@scewo.ch.

- 1 Mesure la profondeur (P) de la marche de l'escalier et note le chiffre.²
- 2 Mesure la hauteur (H) de la marche de l'escalier et note le chiffre.³
- 3 Cherche dans le tableau les dimensions de la marche d'escalier que tu as déterminées et tu verras si BRO peut emprunter cet escalier.

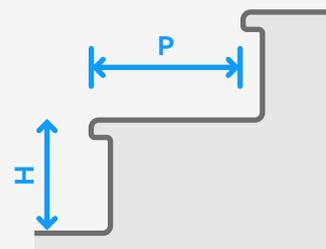

		Profondeur (P)															
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Hauteur (H)	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	16	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	17	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	18	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	19	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	20	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	21	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

¹ Les escaliers en colimaçon ne sont pas franchissables avec BRO.

² La profondeur de la plate-forme après la volée d'escalier doit être d'au moins 120 cm.

³ Des marches isolées sont franchissables jusqu'à une hauteur maximale de 20 cm.