

# Mises à jour BRO.

Voici comment télécharger la dernière version du logiciel sur ton BRO.


Grâce aux mises à jour régulières du logiciel, BRO devient de plus en plus intelligent et apprend en permanence de nouvelles fonctions. Tu trouveras ici un aperçu du processus de mise à jour, afin que toi et ton BRO puissiez également profiter des dernières améliorations.

As-tu, malgré le guide, le moindre doute pour mettre à jour le logiciel de BRO ? Nous t'aiderons volontiers. Tu trouveras nos coordonnées et celles de nos partenaires sur notre site web.

1

Assure-toi que ton smartphone est connecté à internet et non à ton BRO.


L'application recherche automatiquement si une mise à jour est disponible. Pour cela, va dans les paramètres puis dans le menu « Logiciel BRO ».

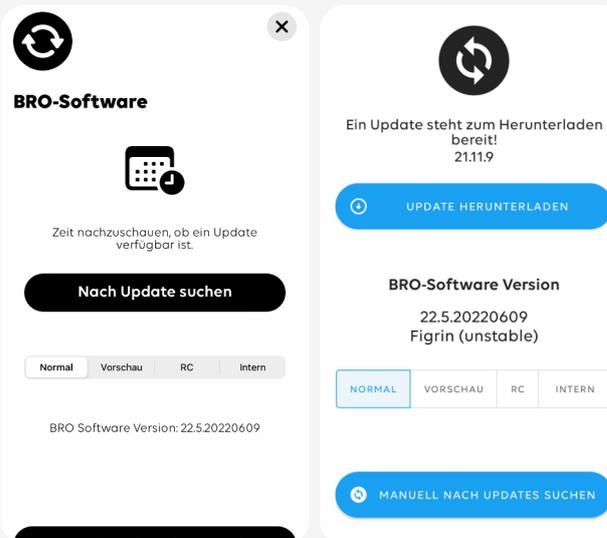

2

Clique sur « Vérifier la mise à jour » et si une mise à jour est disponible, sur « Télécharger la mise à jour ».


La mise à jour va maintenant être téléchargée, ce qui prend environ une minute.

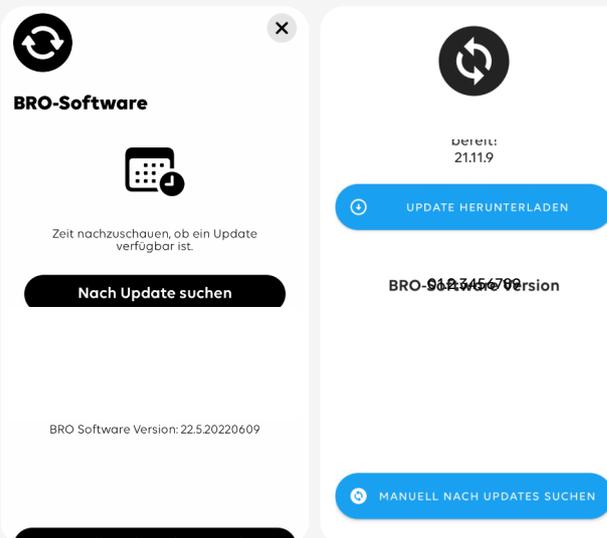

3


Pour que le nouveau logiciel puisse être installé sur BRO, les conditions suivantes doivent être respectées :

1. L'application doit être connectée à BRO.
2. BRO doit être en mode parking.
3. La batterie de BRO doit être chargée à au moins 20 %.

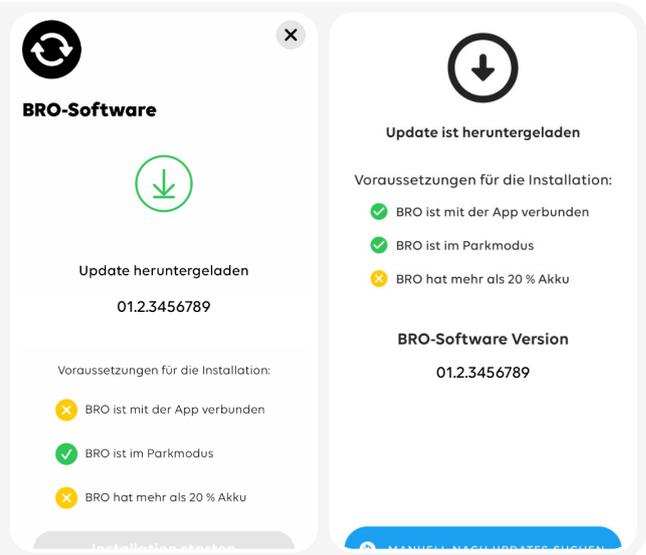


4

Si toutes les conditions sont respectées, clique sur le bouton « Démarrer l'installation » et ton BRO sera mis à jour.

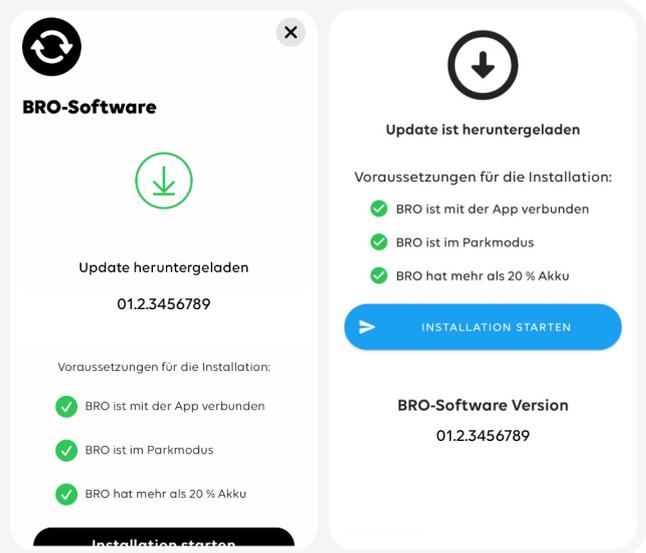


5

La mise à jour est d'abord envoyée à ton BRO, puis installée directement.

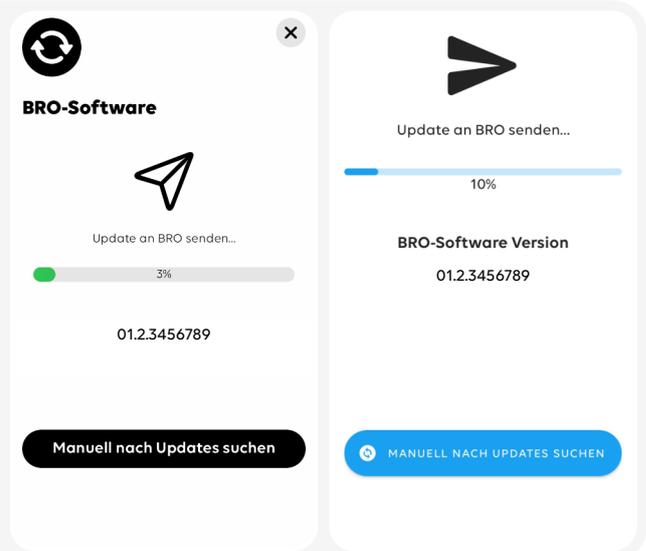

6

Ton BRO redémarre automatiquement. Connecte-le à nouveau à l'application dès que le panneau de contrôle s'allume en vert.

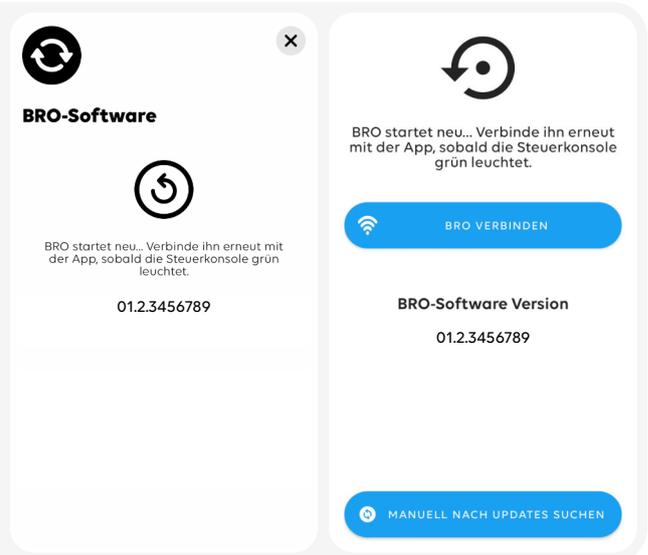

7

Ton BRO est maintenant à jour et prêt pour la prochaine aventure.

Dans les paramètres, sous « Logiciel BRO », tu peux voir quelle version du logiciel est installée sur ton BRO.

