


BRO comme bagage.

Détermine si tu peux ranger BRO comme bagage dans ta voiture.

BRO a été conçu de manière à pouvoir être transporté sans problème dans différents modèles de voitures. Le dossier peut être rabattu ou même démonté. Il peut ainsi être rangé dans des espaces de rangement encore plus petits. Grâce à ce guide, tu peux facilement vérifier si BRO peut être transporté dans ta voiture. Pour cela, suis les trois étapes suivantes.

Même après avoir pris les dimensions, tu n'es pas sûr si BRO rentre dans ta voiture ? Nous sommes là pour t'aider. Contacte-nous à l'adresse sales@scewo.ch.

- 1 Mesure la profondeur (P) du coffre de ta voiture.
- 2 Mesure la hauteur (H) du coffre de ta voiture.¹
- 3 Cherche les dimensions du coffre que tu as déterminées dans le tableau et tu verras si BRO y trouve sa place.

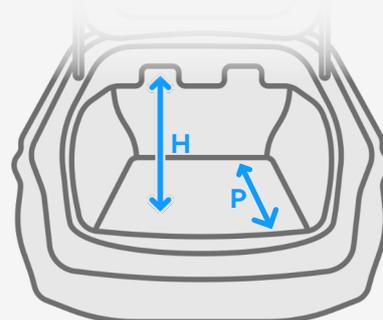

¹ Assure-toi de mesurer la hauteur la plus basse (trappe de chargement).

		Profondeur (P)			
		jusqu'à 107.5 cm	107.5 – 113 cm	113 – 119.5 cm	À partir du 119.5 cm
Hauteur (H)	jusqu'à 67 cm	✗	✗	✗	✗
	67 – 72.5 cm	✗	✓	✓	✓
	72.5 – 73.5 cm	✗	✓	✓	✓
	73.5 – 79 cm	✗	✓	✓	✓
	À partir du 79 cm	✗	✓	✓	✓

- ✗ Malheureusement, BRO ne rentre pas dans ta voiture.
- ✓ BRO rentre dans ta voiture avec le dossier démonté.
- ✓ BRO rentre dans ta voiture avec le dossier rabattu.