

BRO Updates.

So lädst Du die neueste Software auf Deinen BRO.


BRO wird dank regelmässiger Software-Aktualisierungen immer intelligenter und lernt laufend neue Funktionen dazu. Hier findest Du einen Überblick über den Update-Prozess, damit auch Du und Dein BRO von den neuesten Verbesserungen profitieren könnt.

Bist Du Dir trotz des Leitfades noch unsicher, wie Du die Software von BRO aktualisierst? Wir helfen Dir gerne weiter. Die Kontaktdaten von uns und unseren Partnern findest Du auf unserer Webseite.

1

Stelle sicher, dass Dein Smartphone mit dem Internet verbunden ist und nicht mit Deinem BRO.


Die App sucht automatisch, ob ein Update verfügbar ist. Gehe dazu in die Einstellungen und zum Bereich «BRO Software».

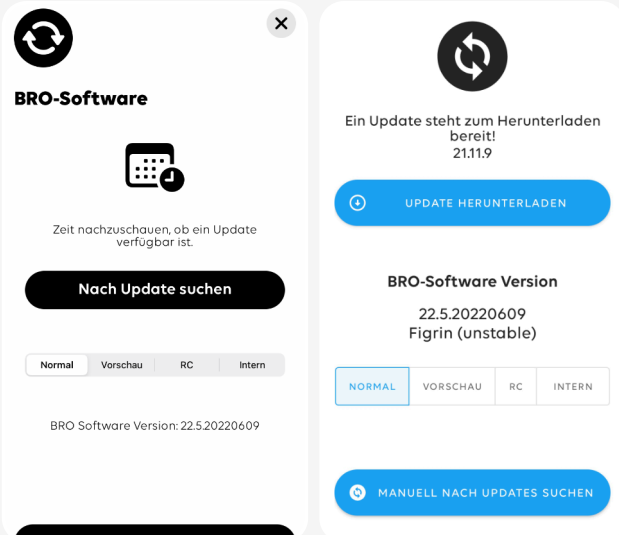

2

Klicke auf «Nach Update suchen» und wenn ein Update verfügbar ist, auf «Update herunterladen».


Das Update wird nun heruntergeladen, was ca. eine Minute dauert.

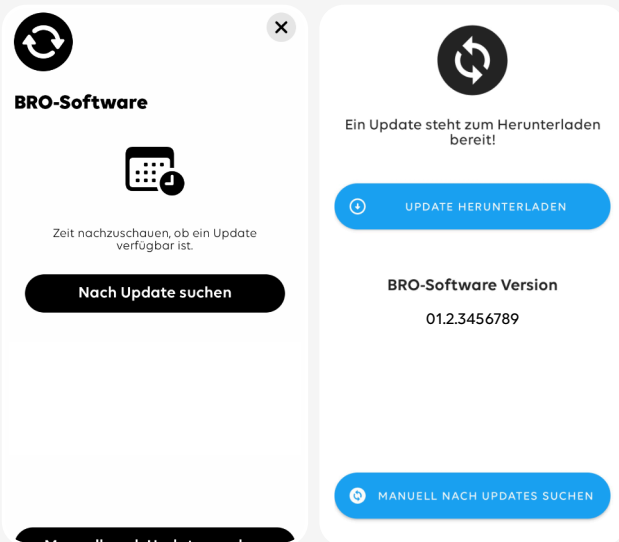

3


Damit die neue Software auf BRO installiert werden kann, müssen folgende Anforderungen erfüllt werden:

1. Die App muss mit BRO verbunden sein.
2. BRO muss sich im Parkmodus befinden.
3. Die Batterie von BRO muss mindestens zu 20 % geladen sein.

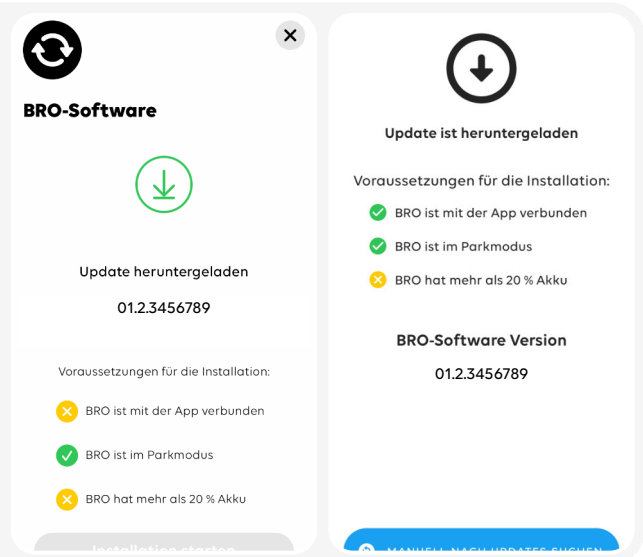


4

Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, klicke auf den Knopf «Installation starten» und Dein BRO wird aktualisiert.

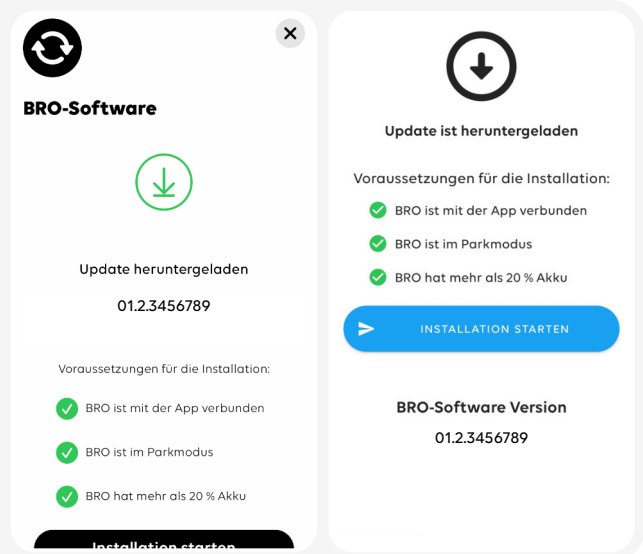


5

Das Update wird zuerst an Deinen BRO gesendet und danach direkt installiert.

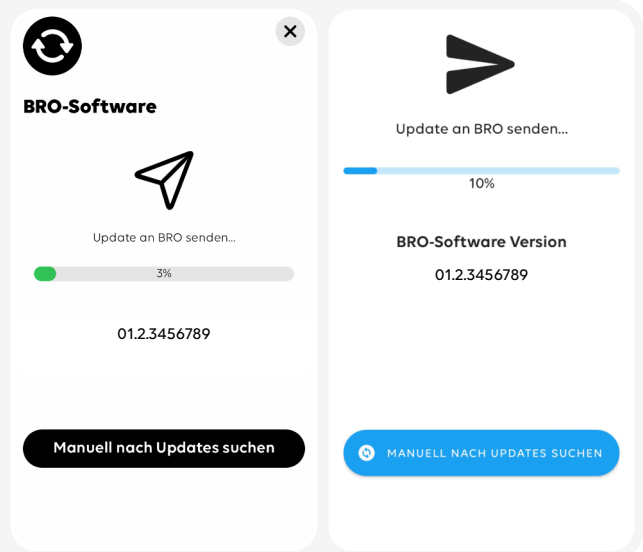

6

Dein BRO startet automatisch neu.
Verbinde ihn erneut mit der App, sobald
die Steuerkonsole grün leuchtet.

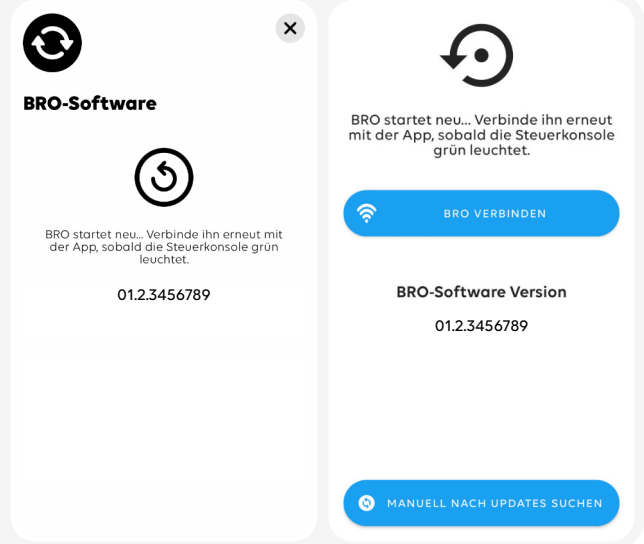

7

Dein BRO ist nun auf dem neuesten Stand
und bereit für das nächste Abenteuer.

In den Einstellungen unter «BRO
Software» siehst Du, welche Software-
Version auf Deinem BRO installiert ist.

